

YOU-Q QLASS



KÄYTTÖOHJE



6000033B

Suomi

© 2012 YOU-Q

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla (elektronisesti tai mekaanisesti) ilman edeltävää YOU-Q:n kirjallista lupaa.

Annetut tiedot perustuvat tämän käyttöohjeen julkaisuajankohtana tiedossa oleviin rakenteita koskeviin yleistietoihin. YOU-Q toteuttaa jatkuvaa tuotteiden parantamiseen tähtäävää työtä ja varaa oikeudet muutosten tekemiseen.

Annetut tiedot koskevat tuotetta perusversionaan. YOU-Q:ta ei voida pitää vastuullisena mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat peruskonfiguraatiosta poikkeavista tuotteen teknisistä ominaisuuksista.

Käytettävissä olevat tiedot on valmisteltu mahdollisimman huolella, mutta YOU-Q:ta ei voida pitää vastuullisena tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai niiden seurauksista. YOU-Q ei ole vastuuvollinen kolmansien osapuolten suorittamista töistä johtuvista haitoista.

YOU-Q:n käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkejä koskeva lainsäädäntö.

2012-09



6000033B

1	Esipuhe	4
2	Yleiskuvaus	4
	2.1 Tuotteen kuvaus, QLASS.....	4
3	Yleistoiminnot	5
	3.1 Istuintyyppi: Irrotus/paikalleen asentaminen	5
	3.2 Selkänoja: Irrotus/paikalleen asentaminen.....	5
	3.3 Jalkatuki: Irrotus/ paikalleen asentaminen	6
	3.4 Käsinoja: Irrotus/ paikalleen asentaminen.....	6
	3.5 Selkänoja (kehikko): taittaminen alas.....	6
	3.6 Päätuoli	7
4	Istuinjärjestelmän säätäminen	8
	4.1 Istuimen syvyysäättö	8
	4.2 Istuinlevyyden säätäminen.....	9
	4.3 Jalkatuken säädöt.....	10
	4.4 Käsinojan säätäminen.....	12
	4.5 Päätuoli	14
	4.6 Lantiovyö.....	15
5	Säädöt	16
	5.1 Comfort-jalkatuet.....	16
	5.2 Pikalukitusvivoilla varustettu päätuoli	16
	5.3 Sähkötoimiset säädöt.....	16
6	Pyörätuoliin nouseminen ja siitä poistuminen (siirtyminen)	17
7	Pyörätuolin vaatiman tilan pienentäminen	18
8	Kunnossapito	18
	8.1 Kunnossapitotaulukko.....	18
	8.2 Päällisten puhdistaminen	18



1 Esipuhe

Tämä käyttöohje

Tämän sähköpyörätuolin käyttöohje koostuu kolmesta kirjasesta. Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen tuotteen ottamista käyttöön. Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ovat keskeisiä pyörätuolin turvallisen käytön ja asianmukaisen kunnossapidon (puhdistamisen) kannalta.

Yleiskäyttöohje (tämä kirjanen)
Istuinjärjestelmän käyttöohje (QLASS)
Ohjainlaitteen käyttöohje

Mikäli jokin näistä ohjekirjoista puuttuu pyörätuolin toimitussisällöstä, ottakaa välittömästi yhteys myyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi tarvitaan myös huoltokäsikirja ammattihenkilöstöä varten.

Tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan tarpeen mukaan näihin muihin käyttöohjeisiin. Tämä osoitetaan seuraavasti:

 **YLEISKÄYTTÖOHJE**

 **OHJAINLAITE**: viittaa hallintalaitteiden käyttöohjeeseen.



Noudata tämän symbolin vieressä olevia ohjeita tiukasti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan tai pyörätuoliin tai ympäristöön kohdistuviin vaurioihin.

CE-vaatimusten-mukaisuusmerkintä

Tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin vaatimusten mukainen ja sillä on siten CE-merkintä.



Takuu

Istuinjärjestelmää koskevat takuehdot ovat identtiset pyörätuolin käyttöohjeisiin sisältyvien takuehtojen kanssa.

2 Yleiskuvaus

2.1 Tuotteen kuvaus, QLASS

Pyörätuoli on varustettu QLASS – istuinjärjestelmällä. QLASS – istuinjärjestelmä tarjoaa erinomaisen tuen päälle, vartalolle, käsivarsille ja jaloille. Optimaalinen kehon tuki takaa pyörätuolin käyttäjälle suurimman mahdollisen riippumattomuuden. Pyörätuolin säätäminen edellyttää pätevää ammattihenkilöstöä. Väärillä säädöillä voi olla haitallisia vaikutuksia istuma-asentoon.



Perehtykää huolella tähän käyttöohjeeseen ennen pyörätuolin käyttämistä.



3 Yleistoinnot

3.1 Istuintyyny: Irrotus/ paikalleen asentaminen

Istuintyynyn irrottaminen (kuva 3.1).
Tyyny irrotetaan vetämällä sitä ylöspäin istuimelta.

Istuintyynyn asentaminen paikalleen
(kuva 3.2).

Paina istuintyyny istuurungon päälle siten, että se loksahtaa paikalleen.



**Varmista, että istuin lukittuu
paikalleen tukevasti.**

3.2 Selkänoja: Irrotus/ paikalleen asentaminen

Selkänojan irrottaminen (kuva 3.3).


Työnnä Q-klipsit ylös.

Nosta selkänoja pois.


Selkänojan asentaminen paikalleen
(kuva 3.3).

Aseta selkänoja kehykseen.


Työnnä Q-klipsit takaisin paikoilleen.

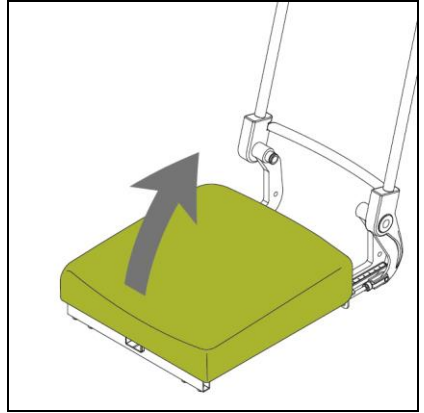

Kuva 3.1

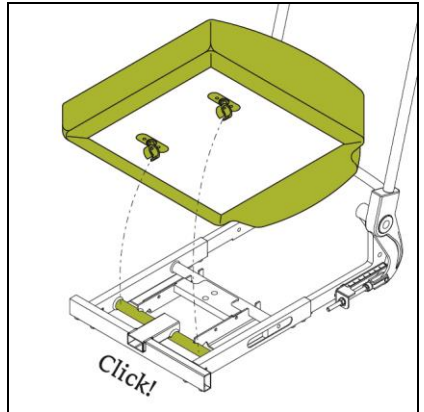

Kuva 3.2

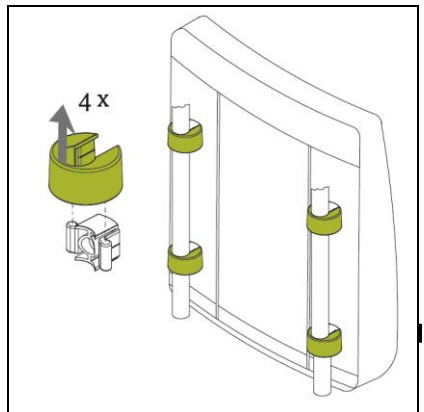

Kuva 3.3


3.3 Jalkatuki: irrotus/ paikalleen asentaminen

Irrutus (kuva 3.4).

1. Avaa pohjehihnaa.
2. Paina salpaa taaksepäin jalkatuen vapauttamiseksi lukituksesta.
3. Käännä jalkatukea ulospäin.
4. Irrota jalkatuki kannattimestaan nostamalla.



Jalkatuen tulee lukkiutua kuuluvasti sitä paikalleen asennettaessa. Tämä osoittaa jalkatuen lukittuneen paikalleen.

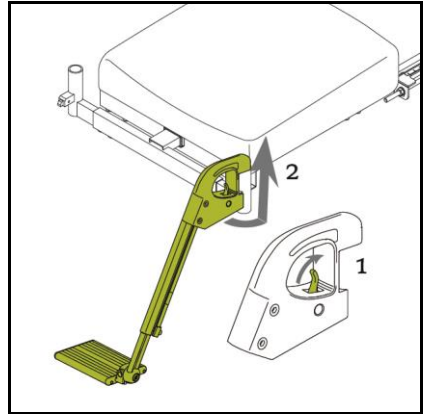

Kuva 3.4


3.4 Käsinoja: irrotus/ paikalleen asentaminen

Käsinojan irrottaminen (kuva 3.5).

1. Työnnä vipua taaksepäin käsinojan vapauttamiseksi lukituksesta.
2. Nosta käsinoja pois paikaltaan.

Käsinojan asentaminen paikalleen (kuva 3.3).


1. Aseta käsinoja kannattimeensa.
2. Lukitse käsinoja kääntämällä vipu pystyasentoon.

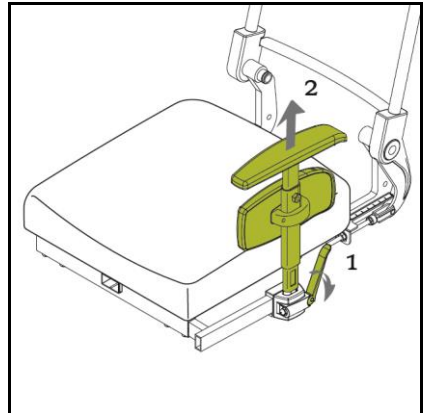

Kuva 3.5

3.5 Selkänoja (kehikko): alas taittaminen

1. Vapauta lukitusrengas säätötangosta (kuva 3.6).
2. Vedä lukitussockka ulos sarananivelistä (kuva 3.6).
3. Taita selkänoja alas (kuva 3.6).

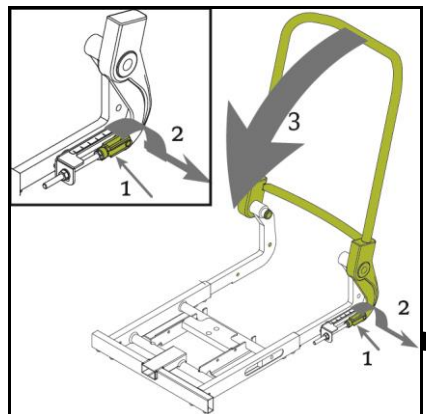

Kuva 3.6


3.6 Päätuki

Päätuen irrottaminen (kuva 3.7).

1. Paina vipua ylöspäin päätuen vapauttamiseksi lukituksesta.
2. Irrota päätuki.

Päätuen asentaminen paikalleen (kuva 3.7).

1. Aseta päätuki kannattimeensa.
2. Lukitse päätuki kääntämällä vipu pystyasentoon..

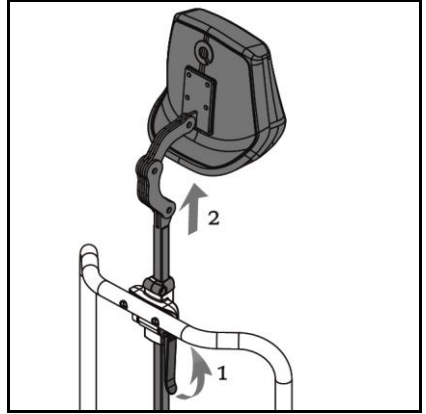


Kuva 3.7

4 Istuinjärjestelmän säätäminen

4.1 Istuimen syvyyssäätö

Istuinsyvyyden säätäminen selkänöjan kehikon avulla (kuva 4.1).

1. Avaa kuusiopultteja puoli kierrosta (180°) istuinkehikon molemmilta puolilta.
2. Siirrä selkänöjan putket haluttuun kohtaan.
3. Kiristä kuusiopultit.

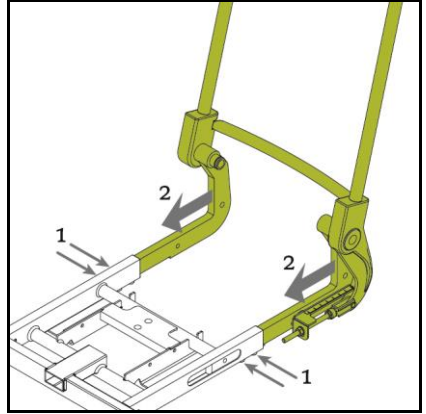

Kuva 4.1

Istuinsyvyyden säätäminen istuintyynyn avulla (kuva 4.2).


1. Irrota istuin (kuva 3.1).
2. Aseta kiristimet sopivaan kohtaan.
3. Lukitse istuintyyny istuinkehikon päälle.



Varmista, että istuin lukkiutuu loksahaan paikalleen tukevasti.



Varmista, että polven takaosan ja istuimen etureunan välissä on ainakin 2 cm vapaata tilaa hyvän verenkierron takaamiseksi.

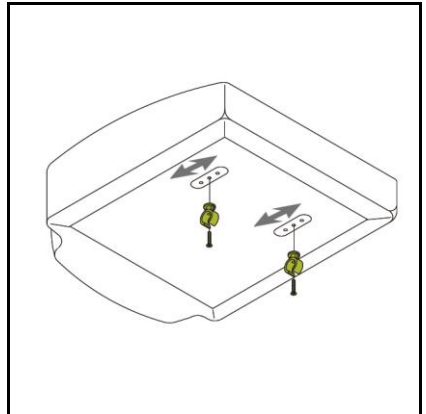


Kuva 4.2

4.2 Istuinleveyden säätäminen

Istuinleveyden säätäminen käsinojen avulla (kuva 4.3).


1. Avaa pultteja.
2. Siirrä käsinoja haluttuun asentoon.
3. Kiristä pultit.

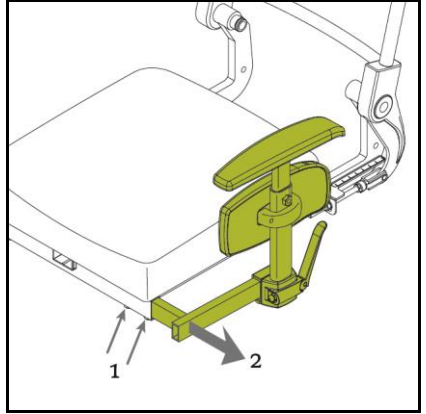

Kuva 4.3

Istuinleveyden säätäminen jalkatukien avulla (kuva 4.4).

1. Avaa pultteja.
2. Siirrä jalkatuet haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultit.

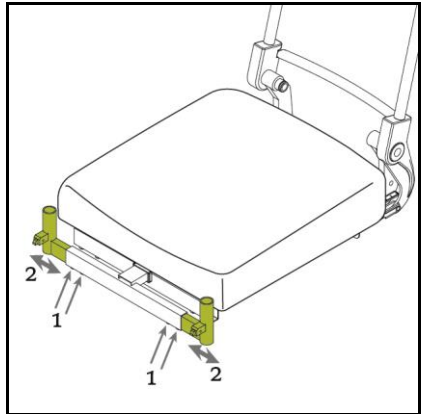


Kuva 4.4

Selkänöjan kallistussäätö

Katso kuva 4.5

1. Avaa pultteja istuinkehikon vasemmalta puolelta.
2. Säädä selkänöjan kallistus halutunlaiseksi.
3. Kiristä pultit.

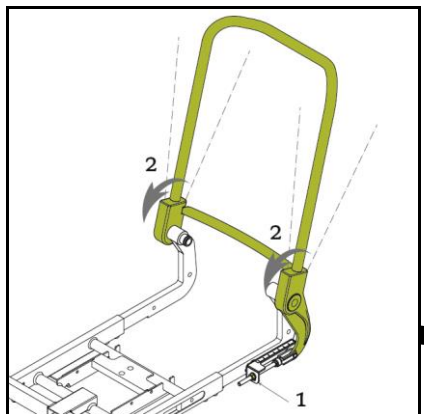

Kuva 4.5


4.3 Jalkatuen säädöt

Säärenpituus (kuva 4.6).

1. Avaa pulttia.
2. Siirrä jalkatuki haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultti.



Varmista, että jalkalautojen alla on riittävästi vapaata tilaa siten, että pyörätuolilla voidaan ylittää esteitä.

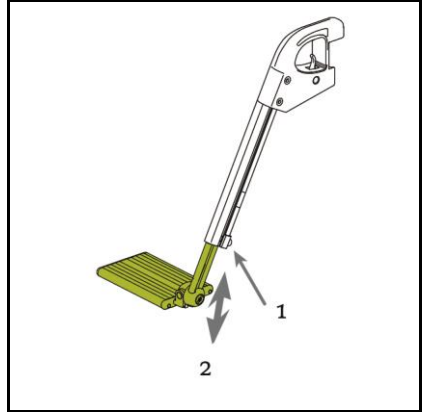

Kuva 4.6

Jalkalaudan kallistuskulma (kuva 4.7)

1. Avaa pulttia.
2. Säädä jalkalautaa haluttuun kulmaan.
3. Kiristä pultti.

Jalkatukien leveyssäätö (kuva 4.4)


Katso kappale 4.2

Istuinsyvyyden säätäminen jalkatukisen avulla (kuva 4.8).


1. Avaa pulttia.
2. Siirrä jalkatuen kannatin haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultti.



- Varmista, että tukipyörät eivät kosketa jalkalautoja pyörätuolia käytettäessä. Mikäli näin on, on jalkatukia siirrettävä eteenpäin. Tukipyörien ja jalkalautojen välissä tulee olla vähintään 1 cm tilaa.
- Varmista, ettei jalkatuen kannatin pääse painamaan epämiellyttävästi polvien alta. Mikäli näin on, on istuinta siirrettävä eteenpäin.

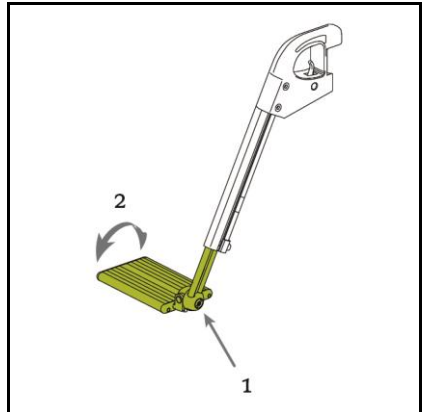


Kuva 4.7

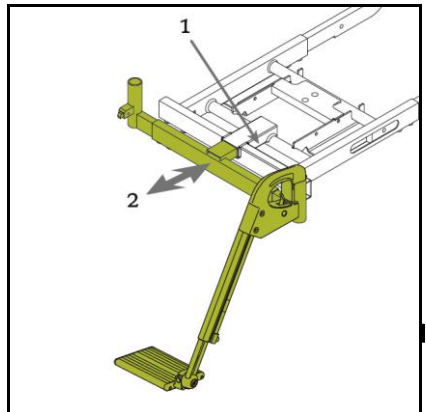

Kuva 4.8

Pohjetuen korkeussäätö (kuva 4.9).

1. Avaa pultteja.
2. Siirrä pohjetuki haluttuun asentoon.
3. Kiristä pultit.

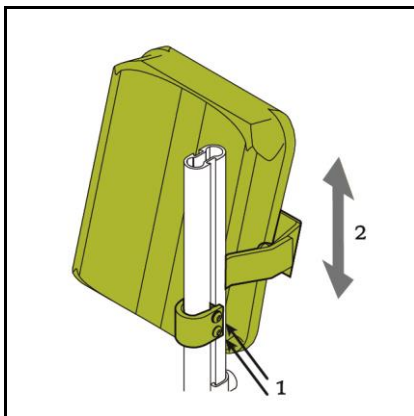

Kuva 4.9


4.4 Käsiinojan säätäminen

Käsiinojan korkeussäätö (kuva 4.10).

1. Avaa pulttia.
2. Siirrä käsiinoja haluttuun asentoon.
3. Kiristä pultti.




Varmista, että käsivarsien tuki on hyvin säädetty, eivätkä tuet paina olkapäitä ylöspäin.

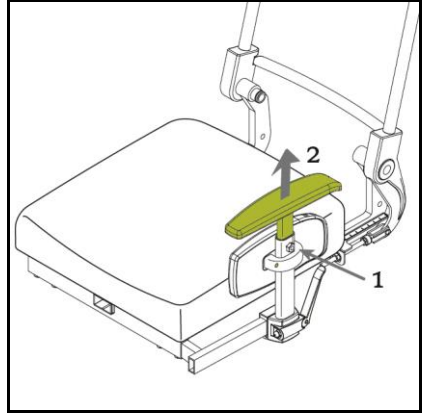

Kuva 4.10

Käsiinojan säätäminen pituussuunnassa (kuva 4.11).

1. Avaa pultteja.
2. Siirrä käsiinoja haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultit.

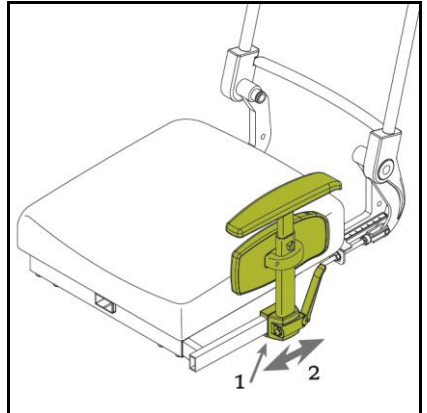


Kuva 4.11

Sivulevyn korkeussäätö (kuva 4.12).

1. Avaa pultteja.
2. Siirrä levy haluttuun asentoon.
3. Kiristä pultit.

Käsiinojan säätäminen leveysuunnassa (kuva 4.3)


Katso kappale 4.2

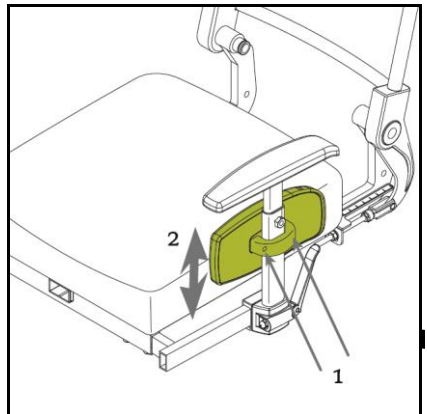

Kuva 4.12

**Ohjainlaitteen säätäminen
pituussuunnassa (kuva 4.13).**


1. Avaa pulttia.
2. Siirrä ohjainlaite haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultti.

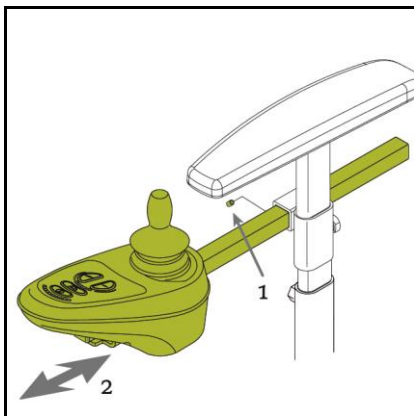

Kuva 4.13

**Ohjainlaitteen korkeussäätö (kuva
4.14).**

1. Avaa pulttia.
2. Siirrä ohjainlaite haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultti.

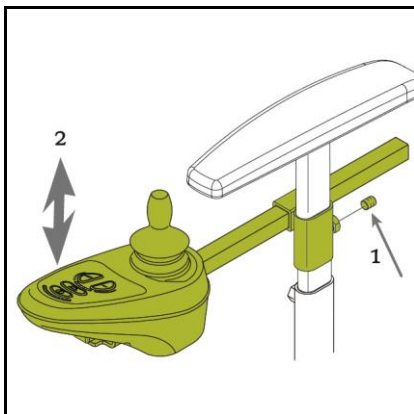


Kuva 4.14

4.5 Päätuki

Korkeus (kuva 4.15).


1. Vedä vipua ylös päätuen vapauttamiseksi lukituksesta.
2. Siirrä päätuki haluttuun kohtaan.
3. Lukitse päätuki kääntämällä vipu pystyasentoon.

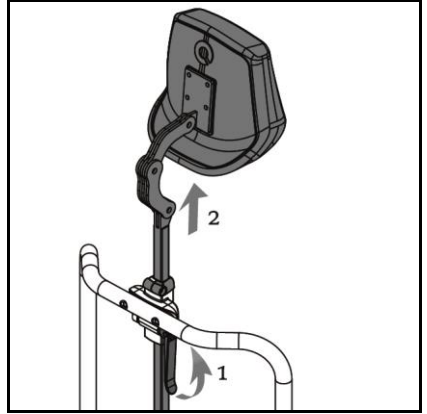

Kuva 4.15

Muistikappale (kuva 4.16).


1. Avaa pulttia.
2. Siirrä muistikappale haluttuun kohtaan.
3. Kiristä pultti.

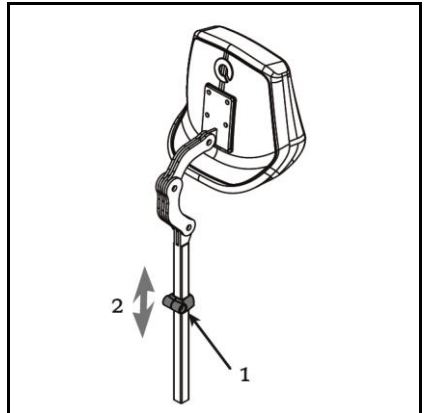

Kuva 4.16

Asento (kuva 4.17).

1. Avaa pultteja (x3).
2. Säädä päätuen asento halutunlaiseksi.
3. Kiristä pultit (x3).

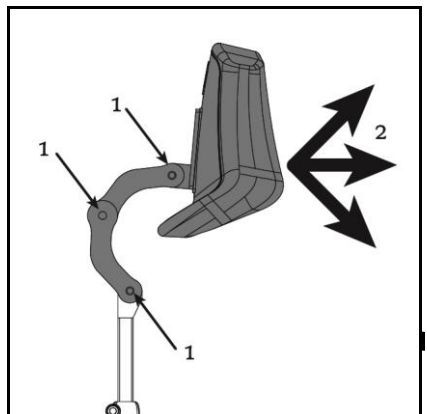

Kuva 4.17

4.6 Lantiovyö

Pyörätuoli on mahdollista varustaa tukivyöllä. Lantiovyö tarjoaa lisätukea normaalissa käytössä

Lantiovyö kiinnitetään seuraavasti (Kuva 4.18):

1. Kiinnitä vyön solki pultin ja mutterin avulla.
2. Työnnä vyö soljen läpi.




Varmista, että lantiovyö on oikein sovitettu pyörätuolin käyttäjälle. Vyön tulisi kulkea tukevasti lantion yli noin 45°:n kulmassa (kuva 4.19).

Vyön sijoittaminen lantion yläpuolelle vasten vatsan pehmeää ihoa saattaa johtaa vääränlaiseen istuma-asentoon ja käyttäjän liukumiseen eteenpäin pyörätuolissa (Kuva 4.20).

Varmista, että vyö on puhdas ja lukitusmekanismi toimii aina. Vyö ja lukitusmekanismi voidaan puhdistaa kostealla liinalla.

Lantiovyötä ei milloinkaan tule käyttää turvavyönä käyttäjää pyörätuolissa kuljetettaessa.

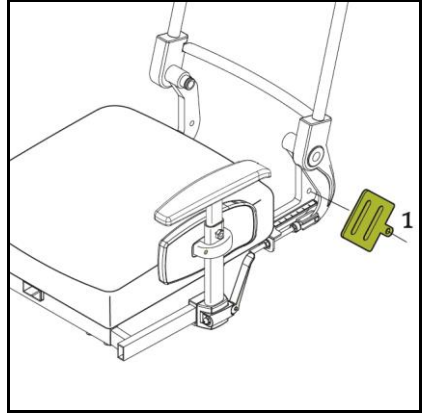

Kuva 4.18



Kuva 4.19 Lantiovyön oikea asent



Kuva 4.20: Väärin sijoitettu lantiovyö

5 Säädöt


5.1 Comfort-jalkatuet

Polven kulma (kuva 5.1).
Comfort-jalkatukien kallistusta voidaan säätää itsenäisesti.

Paina kahvaa eteenpäin.

Nosta jalkaa ylös.

Vapauta kahva, kun jalkatuki on halutussa asennossa

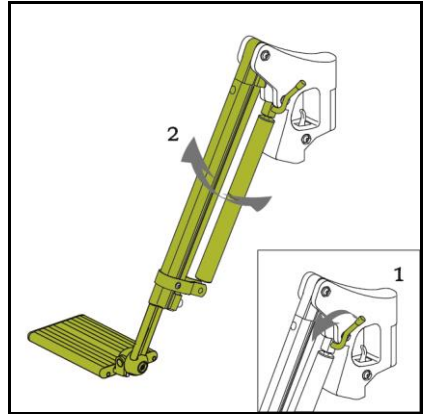

Kuva 5.1

5.2 Pikalukitusvivuilla varustettu päätuki

Asento (kuva 5.2).

Avaa kiristimiä (x3) muutaman kierroksen verran.

Säädä haluttuun asentoon.

Kiristä tiukalle (x3)..



Kuva 5.2

5.3 Sähkötoimiset säädöt

Soveltuvin osin:

Sähkötoiminen istuimen kallistus

 OHJAINLAITE

Sähkötoiminen istuimen korkeussäätö


 OHJAINLAITE

Sähkötoiminen selkänöjan kallistus

 OHJAINLAITE

Sähkötoimiset jalkatuet

 OHJAINLAITE

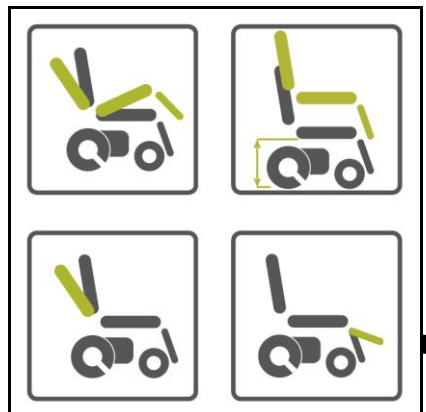

Kuva 5.3


6 Pyörätuoliin nouseminen ja siitä poistuminen (siirtyminen)




Älä seiso jalkalautojen päällä. Niitä ei ole suunniteltu kestämaan henkilön koko painoa. Lisäksi se voi aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen.

Siirtyminen etupuolelta

1. Käännä jalkalaudat ylös (kuva 6.1).
2. Käännä pohjetuet sivuun (mikäli asennettu) (kuva 6.1).
3. Mikäli mahdollista, käännä jalkatuet sivuun (kuva 6.2).
4. Istuudu tuoliin.

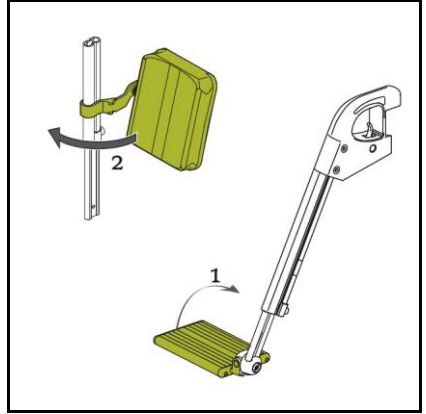


Kuva 6.1

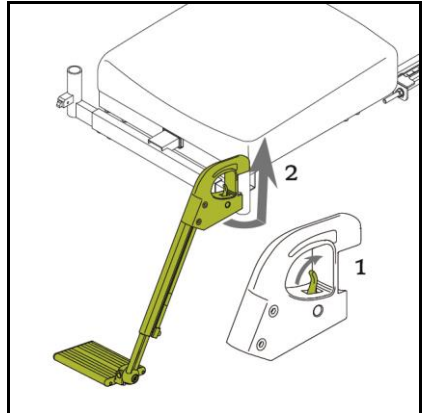

Kuva 6.2

Siirtyminen sivulta

1. Vapauta käsinoja lukituksesta vipu taaksepäin työntämällä (kuva 6.3).
2. Irrota käsinoja (kuva 6.3).
3. Istuudu tuoliin.

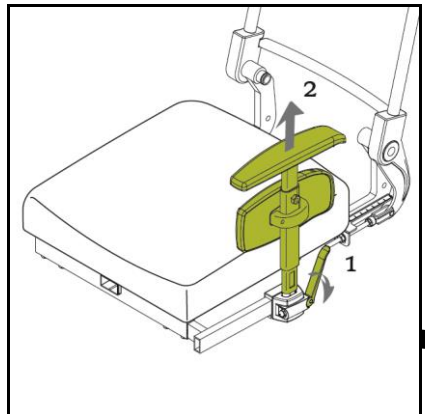

Kuva 6.3

7 Pyörätuolin vaatiman tilan pienentäminen

Pyörätuolia voidaan pienentää sen kuljettamiseksi ilman käyttäjää. Kaikki helposti irrotettavat pyörätuolin osat tulee irrottaa ja säilyttää turvallisessa paikassa. Selkänoja voidaan myös taittaa alas pyörätuolin mahdollittamiseksi auton tavaratilaan.

1. Irrota istuintyyny. Katso kappale 3.
2. Irrota selkänoja. Katso kappale 3.
3. Irrota jalkatuki. Katso kappale 3.
4. Irrota käsinojat. Katso kappale 3.
5. Irrota päätuet. Katso kappale 3.
6. Taita selkänojan kehikko alas. Katso kappale 3.

8 Kunnossapito

8.1 Kunnossapitotaulukko

Pyörätuoli suositellaan huollatettavaksi myyjän toimesta kerran vuodessa, tai runsaasti käytettäessä puolivuositain. Alla olevassa taulukossa mainitaan toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa itse.

Kuinka usein	Kuvaus
Kerran kuukaudessa	Tarvittaessa päällisten puhdistus. Katso 8.2.

8.2 Päällisten puhdistaminen

Puhdista päälliset kostealla liinalla ja taloussaippualla. Pyyhi päälliset sitten kuiviksi kuivalla, pehmeällä liinalla.



Älä käytä tinneriä, bentseeniä tai lakkaspriitä.

Päällisiä ei tule kuivapestä, silittää eikä kuivata kuivausrummussa

Jälleenmyyjä:

Handico Oy
Turkkirata 28C
33960 Pirkkala
Puh. +358 3 31222700
Fax +358 3 31222710
handico@handico.fi



YOU-Q B.V.
Lagedijk 31
5705 BX Helmond

T +31(0)492 50 57 00
F +31(0)492 50 57 01
info@you-q.nl
www.you-q.nl